



**C.S.O. Canule souple oro-pharyngée**

# CAPAX<sup>®</sup>



• Nouveau  
**Pour :**  
**Ronflements**  
**Apnées du**  
**Sommeil**

**CE** 0459

N° GENCOD	PRÉSENTATION	P PUBLIC CONSEILLÉ	TVA	SÉC. SOC.
3 760010 900017	Boite unitaire - Pochette de rangement	59 •	19,6 %	NR

## MODE D'UTILISATION

- ✓ Mise en place dans la bouche durant le sommeil
- ✓ Période d'adaptation pouvant durer de quelques jours à 3 semaines.
- ✓ Utilisation simple.
- ✓ Mettre progressivement la canule en place dans la bouche durant la journée, sans l'enfoncer, pour s'habituer au tube souple.
- ✓ S'habituer en l'enfonçant de plus en plus.
- ✓ Lorsque la canule est suffisamment bien supportée dans la bouche, la mettre autour du cou au moment du coucher, élastique en place.
- ✓ Juste avant l'endormissement mettre la canule en place en l'enfonçant doucement.
- ✓ Si la canule sort pendant la nuit la remettre au besoin en cas de réveil.
- ✓ Entretien et nettoyage facile à l'eau, après démontage éventuel.
- ✓ Désinfection avec un comprimé pour prothèses dentaires.
- ✓ Renouvellement annuel du fait de la contamination microbienne des silicones.

## CARACTÉRISTIQUES MAJEURES

- ✓ Prothèse médicale classe II a **CE** 0459.
- ✓ Tube souple en silicone et filtre extérieur en polypropylène et mousse polyuréthane.
- Indications :**
- ✓ Ronflements - Apnées du sommeil.
- ✓ Taille unique - Réservé à l'adulte
- Mode d'action :**
- ✓ Permet le passage direct de l'air dans les poumons.
- Contre-Indications :**
- ✓ Allergies aux silicones et matières plastiques.
- Précautions d'emploi :**
- ✓ Consulter un médecin au préalable en cas d'apnées fréquentes ou importantes durant le sommeil.
- ✓ Interrompre l'utilisation en cas d'allergies.
- Effets indésirables :**
- ✓ Nausées, surtout au début de l'adaptation.
- ✓ Hypersalivation à l'endormissement.

## Conseils pratiques

⊘ L'apprentissage est nécessaire pour bien supporter la canule

⊘ La rééducation et le remodelage progressif de la base de la langue permet, dans certains cas, de ne plus avoir besoin de la canule pendant plusieurs mois, les ronflements ayant disparu, de même qu'un certain nombre d'apnées.

# CAPAX®

## C.S.O. Canule souple oro-pharyngée

### INFORMATIONS

#### Un nouveau système efficace contre le ronflement et les apnées du sommeil

Ce nouveau dispositif, mis au point par un O.R.L. en collaboration avec des ronfleurs, permet la suppression des ronflements et de certaines apnées du sommeil.


Ce système est simple, d'un emploi facile et sans danger. Il est constitué d'une canule faite d'un tube souple sur lequel est adapté un filtre.

Ce dispositif est entièrement démontable afin de permettre un nettoyage et une désinfection faciles.

Comme vous pouvez le constater sur les schémas, le tube souple s'introduit dans la bouche et le filtre vient contre les lèvres.

En place dans la bouche, le tube souple permet la déglutition de la salive et le passage de l'air sans bruit jusqu'au larynx en évitant les vibrations.

**Le ronflement est donc supprimé.**

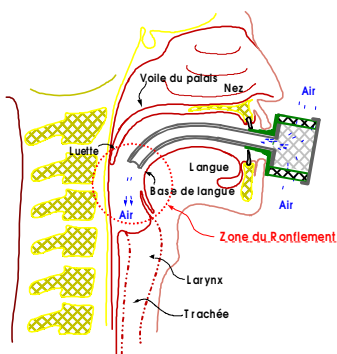

Un élastique, réglable à volonté, permet de maintenir la canule en place pendant le sommeil.

Le filtre a pour objet de nettoyer et d'humidifier l'air inspiré, comme le fait le nez normalement, afin d'éviter le dessèchement des muqueuses de la bouche, du larynx et de la trachée.

Le tube de la canule est en silicone souple et transparente pour usage médical permettant le contact avec les muqueuses.

L'introduction de la canule demande une certaine accoutumance. De par la souplesse de ce tube, et après quelques essais, la canule sera bien supportée.

La respiration nocturne est ainsi normalisée avec tous les avantages qui en découlent, en particulier le retour à un sommeil physiologique satisfaisant et réparateur.

### RENSEIGNEMENTS

**CAPAX** apportera un confort et un bien-être qui seront appréciables dans la vie quotidienne des ronfleurs et des apnéiques.

En effet, la ronchopathie et encore plus le syndrome d'apnées du sommeil sont responsables de troubles du système cardiaque, vasculaire et encéphalique.

#### L'ENTRETIEN :

Il suffit de nettoyer chaque matin la partie souple en la passant sous l'eau tiède et d'utiliser le petit goupillon si des mucosités se sont déposées à l'intérieur.

Afin d'avoir une désinfection du tube souple il est recommandé de le faire tremper dans un verre avec un comprimé désinfectant utilisé pour les prothèses dentaires. Le filtre peut être également nettoyé de la même façon et désinfecté après démontage.

Une bonne utilisation de la canule doit permettre une utilisation satisfaisante pendant 1 an.

**Pour des raisons sanitaires de contamination microbienne et d'infections des voies aériennes, il est impératif de changer la canule après un an d'utilisation.**

**GARANTIE :** La canule est garantie 6 mois contre tout défaut de fabrication et dans le cadre d'une utilisation normale.

Dispositif médical de Classe II a, marquage **CE, G Med, 0459**

**VIDAL 2003 :** Capax : Accessoires page 20

Site Internet : [www.capax.tm.fr](http://www.capax.tm.fr)

**CE PRODUIT EST EXCLUSIVEMENT RESERVE A L'ADULTE.**

**Aéroflux Médical International A.M.I.**

3, rue de Péruwelz  
91550 PARAY-VIEILLE-POSTE France

? Commandes : Tél. / Fax : 01 69 84 72 47

? Renseignements : 06 15 34 52 03

? e-mail : [aeroflux@wanadoo.fr](mailto:aeroflux@wanadoo.fr)

- Livraison sécurisée par **La Poste** en **Colissimo suivi**
- Franco de port

\*\*\* A.M.I. sarl Siège Social : 72 rue Lauriston 75016 PARIS RCS : PARIS B 413 172 032 \*\*\*